

CosmoPen

Caneta de Infusão Automática

Reg. Anvisa nº: 81676079007

Descrição geral dos produtos


Caneta de infusão automática, desenvolvida para oferecer um novo conceito na aplicação da técnica da Terapia de Indução Percutânea de Colágeno, ou Microagulhamento, combinado a mesclas que são colocadas dentro do cartucho ampola para uma simultânea e perfeita entrega transdérmica de ativos.

A CosmoPen é reutilizável, fabricada em alumínio de alta durabilidade, e utiliza cartuchos de 3ml esterilizados por Raios Gama, disponíveis em 3 modelos: Nano R, 0,50mm e 1,00mm.

Possui monitor digital com 6 níveis de velocidade que podem ser ajustados pelo profissional.

É indicada para tratamentos como: cicatrizes (acne, varicela, cirúrgicas e de queimaduras), linhas de expressão, rugas, sinais do tempo e danos causados pelo sol.

Caneta CosmoPen e Cartuchos

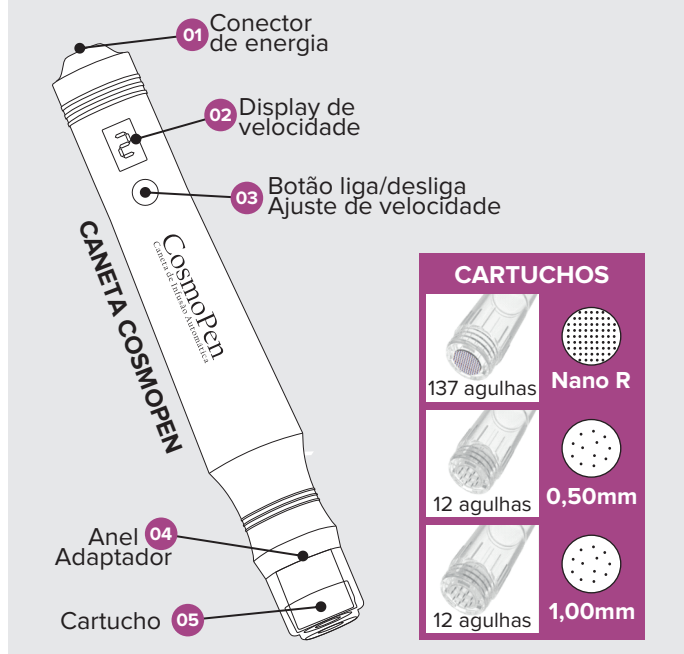

Manutenção da Caneta

- Dispositivo reutilizável. Recomenda-se a limpeza sempre após o uso, em modo desligado, sem o cartucho, com pano macio umedecido e com detergente neutro, e após com álcool 70%.
- Aguardar a secagem completa antes de utilizá-la novamente.
- Armazenar em ambiente com temperatura entre -2°C a 50°C.
- Ler o manual de uso antes de iniciar o tratamento.

Advertências e Precauções

- Produto destinado a ambiente asséptico.
- Uso apenas por profissional qualificado e habilitado.
- Cartuchos esterilizados por Raios Gama.
- Armazenar os cartuchos em ambiente com temperatura entre -2°C a 40°C.

IFU Instruções de Uso

Instructions for Use

- Após aberto, usar imediatamente.
- Cartuchos de uso único, é proibido reprocessar.
- Não utilizar o cartucho se a embalagem foi aberta, danificada ou molhada.
- Após o uso descartar o cartucho de acordo com os critérios vigentes de biossegurança.
- Material Classe II.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Instruções de uso

1. Escolher o modelo de cartucho que melhor atende às necessidades do paciente;
2. Verificar se a embalagem do cartucho não está danificada e se o produto encontra-se estéril. Caso a embalagem esteja danificada a esterilidade do produto não está garantida. Neste caso, descartar o produto e utilizar outro;
3. Abrir a embalagem do cartucho através da técnica asséptica (sempre utilizar a pétala);
4. Remover a tampa do cartucho, colocar até 3ml do ativo/mescla da preferência do profissional e recolocar a tampa no cartucho;
5. Remover a tampa protetora das agulhas e encaixar (sem rosquear) o cartucho na caneta. Não inverter o instrumento para evitar o refluxo de líquido;
6. Encaixar (sem rosquear) o adaptador na caneta. A caneta CosmoPen está pronta para uso;
7. Deslizar suavemente a caneta CosmoPen sobre a área a ser tratada, mantendo a intensidade e velocidade constantes para a criação correta de microcanais. Efetue de 2 a 4 passadas no local definido, em sentidos diversos (vertical, horizontal e diagonal);
8. Após o uso descartar o cartucho em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.



Prazo de Validade

Caneta CosmoPen - Indeterminada.
Cartuchos - 4 anos.