

MesoDERM®



Reg. Anvisa nº: 81676070022

Descrição geral do produto


Agulha com bisel trifacetado destinada ao uso em conjunto com seringa para aplicação de soluções e medicamentos em diferentes vias de administração, como: endovenosa, intramuscular, intradérmica e subcutânea.

Disponível em diferentes modelos: MD-30G-8, MD-30G-13, MD-32G-4, MD-32G-6, MD-32G-13 e MD-34G-8 Slim.

A agulha MesoDerm® possui protetor traseiro com coloração específica, conforme dimensões do produto.

Embalada individualmente em papel de grau cirúrgico, esterilizada.

Partes da agulha MesoDerm®

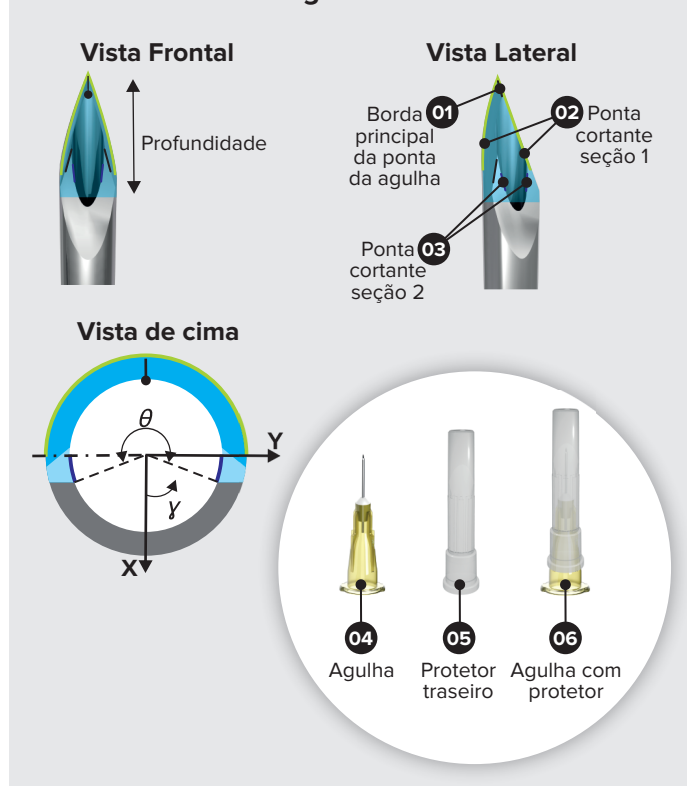

Modelos Disponíveis



MD-30G-4 MD-30G-8 MD-30G-13



MD-32G-4 MD-32G-6 MD-32G-13 MD-34G-8

IFU Instruções de Uso

Instructions for Use

Advertências e Precauções

- Produto estéril. Esterilização por Óxido de Etileno, livre de pirogênicos e metais pesados.
- Produto destinado a ambiente asséptico.
- Uso apenas por profissional qualificado e habilitado.
- Após aberto, usar imediatamente.
- Armazenar em temperatura ambiente. Evitar exposição direta a luz, calor e umidade.
- Produto de uso único, é proibido reprocessar.
- Não utilizar se a embalagem foi aberta, danificada ou molhada.
- Após o uso descartar a agulha em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.
- Material Classe II.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem do produto não está danificada e se o produto encontra-se estéril. Caso a embalagem esteja danificada a esterilidade do produto não está garantida. Neste caso, descartar o produto e utilizar outro;
2. Abrir a embalagem do produto através da técnica asséptica (sempre utilizar a pétala);
3. Conectar a agulha MesoDerm® em um aplicador (seringa) contendo o material a ser injetado;
4. Inserir a agulha MesoDerm® na derme do paciente e aplicar o conteúdo da seringa;
5. Após o uso descartar a agulha em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.



Prazo de Validade

04 anos após a esterilização.