



## Descrição geral do produto


Microcânula semiflexível para procedimentos de preenchimento. Disponível em 4 modelos com diferentes comprimentos, acompanha agulha auxiliar.

A microcânula ProDeep HOF é fabricada em aço inox cirúrgico de alta qualidade. Possui ponta romba e abertura lateral ampla, o que permite tratar uma área maior com apenas um ponto de injeção. Apresenta marcadores de profundidade de 10 em 10 mm e marcação diamante para maior controle e segurança do profissional durante o procedimento.

É indicada para procedimentos de preenchimento subcutâneo facial utilizando ácido hialurônico e outros preenchedores devidamente certificados.

A agulha auxiliar é apenas um acessório utilizado para fazer a incisão pela qual a microcânula será introduzida na pele. Embalada individualmente em papel de grau cirúrgico, esterilizada.

## Partes da microcânula ProDeep HOF

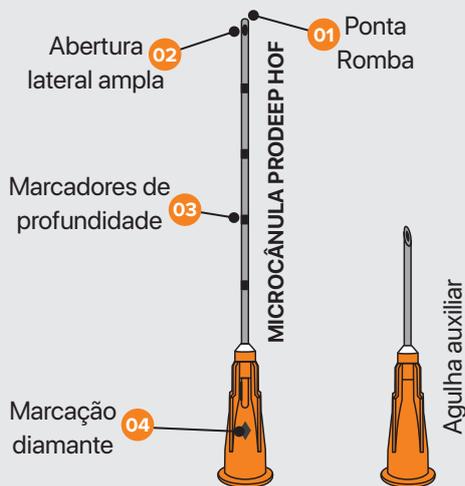

## Advertências e Precauções

- Produto estéril. Esterilização por Óxido de Etileno, livre de pirogênicos e metais pesados.
- Produto destinado a ambiente asséptico.
- Uso apenas por profissional qualificado e habilitado.
- Após aberto, usar imediatamente.
- Material Classe II.

- Armazenar em ambiente com temperatura entre -2°C a 40°C.
- Produto de uso único, é proibido reprocessar.
- Não utilizar se a embalagem foi aberta, danificada ou molhada.
- Após o uso descartar o produto de acordo com os critérios vigentes de biossegurança.

## MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



## Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem secundária do produto não está danificada e se o produto encontra-se estéril. Caso a embalagem esteja danificada a esterilidade do produto não está garantida. Neste caso, descartar o produto e utilizar outro;

2. Abrir a embalagem do produto através da técnica asséptica (sempre utilizar a pétala);

3. Conectar a microcânula em um aplicador (seringa) contendo o material a ser injetado;

4. Retirar a agulha da sua embalagem e fazer uma pequena incisão no local onde a microcânula será inserida;

5. Retirar a agulha e inserir a microcânula;

6. Aplicar o conteúdo do aplicador (seringa);

7. Após o uso descartar a microcânula e a agulha em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.



## Prazo de Validade

04 anos após a esterilização.