

# Skin Pencil

## LÁPIS DERMATOGRÁFICO

# IFU

## Instruções de Uso

Instructions for Use

### Descrição geral do produto

Lápis dermatográfico desenvolvido especialmente para marcação de pontos na pele. Indicado para toxina, preenchimento ou procedimentos afins.

Possui apontador acoplado à tampa e régua até 12cm para maior praticidade.

Fabricado em madeira de alta qualidade e textura suave.

Disponível em 03 cores: preto, marrom e branco.

### MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Limite de temperatura



Proteger de umidade



Proteger do calor



Não contém latex.



Consultar instruções de uso.




Não use se a embalagem estiver danificada ou aberta.



Produto não estéril.

### Lápis Dermatográfico Skin Pencil

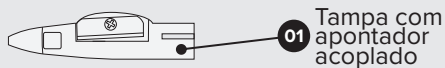

01 Tampa com apontador acoplado



02 Lápis visão lateral - régua



03 Lápis visão lateral - marca

### Cores disponíveis:



preto



marrom



branco

### Instruções de uso

1. Escolher a cor do lápis que melhor atende o tipo de pele do paciente;

2. Verificar se o lacre de segurança do lápis não está danificado/aberto, neste caso, descartar o produto e utilizar outro;

3. Abrir o lacre de segurança do lápis e remover a tampa/apontador;



4. Deslizar suavemente o lápis Skin Pencil sobre a área da pele do paciente a ser tratada. Demarcar de acordo com o procedimento que será realizado;

5. Utilizar a demarcação como guia durante o procedimento para otimizar a qualidade dos resultados pretendidos;

6. Após o procedimento, retirar as demarcações da pele do paciente utilizando gaze e álcool 70° ou clorexidina;



7. Após o uso, colocar a tampa e guardar o lápis Skin Pencil em local seco e arejado até o próximo uso.

### Advertências e Precauções

- Produto não estéril.
- Armazenar em ambiente com temperatura entre -2°C a 40°C.
- Não utilizar o lápis se o lacre foi aberto, danificado ou molhado.
- Material Classe I.

### Prazo de Validade

4 anos a partir da data de fabricação.



Rev. 01 - Julho/2022

www.alur.com.br