

# SKINVibra

Massageador por vibração

## Descrição geral do produto

O SkinVibra, modelo VIB-100, é um massageador de alta vibração que estimula a circulação sanguínea, potencializa a absorção de dermocosméticos e ameniza a sensação de desconforto do paciente em relação à picada da agulha.

Topo em formato "T"



Botão ON/OFF e tampa da pilha

## Advertências e Precauções

- Produto não estéril.
- Armazenar em ambiente com temperatura entre -2°C a 40°C.
- Proibido reprocessar.
- Após o uso, em caso de contato com a água, seque o produto totalmente.
- Mantenha em local seco e arejado..



MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO

# IFU

Instruções de Uso  
Instructions for Use

## Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem do produto não está danificada;
2. Retirar o produto da embalagem;
3. Para ligar, girar a tampa no sentido do botão ON



4. Usar o topo em formato T para a finalidade escolhida.

5. Desligar o equipamento, girando a tampa no sentido do botão OFF

6. Após a finalização do procedimento, higienizar o Skin Vibra com álcool 70%.

7. Substituir a pilha quando necessário. Recomenda-se utilizar pilha alcalina que possui maior duração. Instruções para troca da pilha disponível no manual do usuário.

## Prazo de Validade

Tempo indeterminado.

## Garantia

Em caso de defeitos de fabricação, a garantia é de 6 meses após a compra. Qualquer dano causado por uso irregular invalidará a garantia.