

Descrição geral

A Alur Derma Pen® G3 é uma caneta eletromédica portátil utilizada, principalmente, para a aplicação da técnica de Microagulhamento ou Terapia por Indução Percutânea de Colágeno.

A Alur Derma Pen® G3 utiliza os cartuchos descartáveis Alur Derma Needles e permite ao profissional o ajuste do comprimento das agulhas entre 0.25mm e 2.5mm. Além disso, o dispositivo eletromédico oferece 6 níveis distintos de velocidade, variando entre 9.000 e 21.500 vezes por minuto.

É indicada para o tratamento de cicatrizes de acne e catapora, pós-cesariana, pós-acidentes, pós-cirurgias corretivas, pós-queimaduras, para estrias e celulite, alopecia (aliada a ativos), olheiras, danos causados pelo sol, poros dilatados; linhas de expressão e rugas; flacidez cutânea e envelhecimento, atua melhorando a textura, a coloração e o aspecto da pele tratada.

Partes da Caneta Alur Derma Pen® G3



Manutenção do Produto

- A caneta Alur Derma Pen® G3 é um dispositivo reutilizável. Recomenda-se a limpeza sempre após o uso, em modo desligado, sem o cartucho, com pano macio umedecido e com detergente neutro, e após com álcool 70%.

IFU Instruções de Uso Instructions for Use

- Aguardar a secagem completa antes de utilizá-la novamente.

Advertências e Precauções

- Produto destinado a ambiente asséptico.
- Uso apenas por profissional qualificado e habilitado.
- Armazenar em ambiente com temperatura entre -25°C a 50°C.
- Não utilizar se o dispositivo estiver danificado.
- Material Classe II.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Instruções de uso

1. Escolher o modelo de cartucho que melhor atende às necessidades do paciente;
2. Verificar se a embalagem do cartucho não está danificada e se o produto encontra-se estéril. Caso a embalagem esteja danificada a esterilidade do produto não está garantida. Neste caso, descartar o produto e utilizar outro;
3. Abrir a embalagem do cartucho através da técnica asséptica (sempre utilizar a pétala). Conectar o cartucho à caneta;



4. Deslizar suavemente a caneta Alur Derma Pen® G3 sobre a área a ser tratada, mantendo a intensidade e velocidade constantes para a criação correta de microcanais. A caneta NÃO deve ser pressionada. Efetue de 2 a 4 passadas no

local definido, em sentidos diversos (vertical, horizontal e diagonal);

5. Após o uso descartar o cartucho Alur Derma Needles em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.



Prazo de Validade

Caneta Alur Derma Pen® G3 - Indeterminada.