

Descrição geral

O cartucho Alur Derma Needles é composto por um cilindro plástico cravejado com uma ou mais microagulhas cirúrgicas ultrafinas com a finalidade de perfurar a pele verticalmente, possibilitando uma rápida e intensa estimulação da produção natural de colágeno e elastina.

As microagulhas são de aço inoxidável 304, material altamente resistente, garantindo um procedimento sem perder o fio da microagulha do início ao fim da sessão.

Os cartuchos Alur Derma Needles são descartáveis, esterilizados e estão disponíveis em 10 modelos, indicados de acordo com o procedimento realizado.


Advertências e Precauções

- Produto estéril. Esterilização por raios gama.
- Produto destinado a ambiente asséptico.
- Uso apenas por profissional qualificado e habilitado.
- Armazenar em ambiente com temperatura entre -2°C a 40°C.
- Não utilizar se a embalagem foi aberta, danificada ou molhada.
- Material Classe II.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO




Partes do cartucho Alur Derma Needles

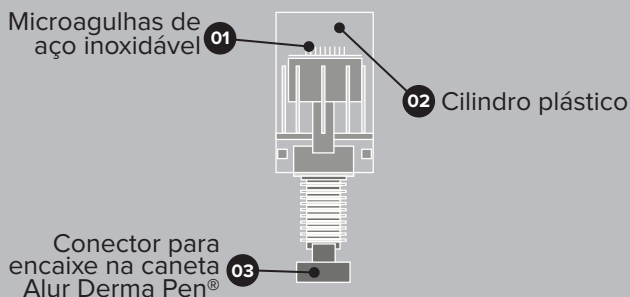


Alur Derma Needles - Indicações



1, 3, 5 e 7 microagulhas
Indicados para
Micropigmentação.

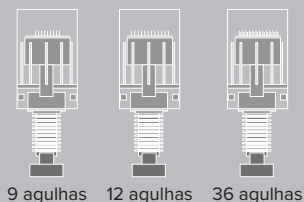

9, 12 e 36 microagulhas
Indicados para
Microagulhamento.

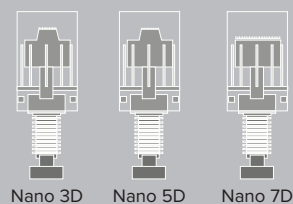

Nanos 3D, 5D e 7D
Indicados para BB Glow.

Instruções de uso

1. Escolher o modelo de cartucho que melhor atende às necessidades do paciente;
2. Verificar se a embalagem do produto não está danificada e se o produto encontra-se estéril. Caso a embalagem esteja danificada a esterilidade do produto não está garantida. Neste caso, descartar o produto e utilizar outro;
3. Abrir a embalagem do cartucho através da técnica asséptica (sempre utilizar a pétala). Conectar o cartucho à caneta;
4. Deslizar suavemente a caneta Alur Derma Pen® sobre a área a ser tratada, mantendo a intensidade e velocidade constantes para a criação correta de microcanais. A caneta **NÃO** deve ser pressionada. Efetue de 2 a 4 passadas no local definido, em sentidos diversos (vertical, horizontal e diagonal);



5. Após o uso descartar o cartucho Alur Derma Needles em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.



Prazo de Validade

Cartuchos Alur Derma Needles - 04 anos.