

ALUR ROLLER Gold®



Reg. Anvisa nº: 81676070003


Descrição geral do produto

Alur Roller Gold® é um dispositivo constituído por um cilindro cravejado com 200 microagulhas cilíndricas ultrafinas (0,20mm de diâmetro na base e 0,07mm na ponta). As microagulhas são de aço inox cirúrgico, laminadas com ouro, com comprimentos variando de 1,00mm a 3,00mm. Altamente resistentes, garantem um procedimento sem perder o fio da microagulha do início ao fim da sessão.

Possui Sistema Cross-Lined (distribuição alternada das microagulhas), proporcionando a criação eficiente de microcanais. O cilindro de microagulhas é preso a um cabo ergonômico de policarbonato, desenhado para se adaptar ao formato da mão.

O Alur Roller Gold® é utilizado para microagulhamento ou Terapia por Indução Percutânea de Colágeno. Indicado para rejuvenescimento da face, pescoço e mãos, cicatrizes (inclusive de acne e queimaduras), estrias, poros abertos, alopecia, e outros. Atua amenizando rugas, linhas de expressão, melhorando a textura e aumentando a firmeza da pele.

Embalado em papel de grau cirúrgico, esterilizado.

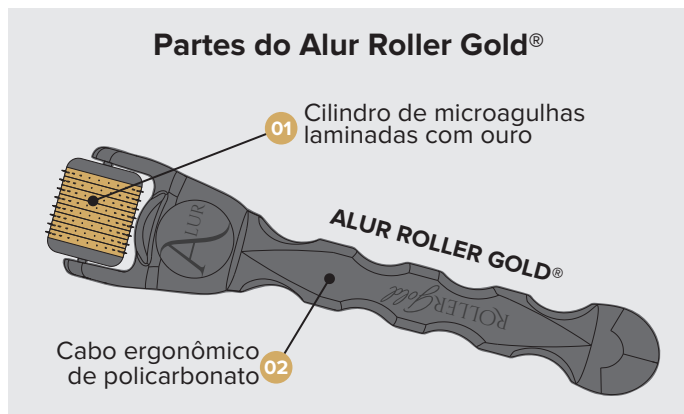

Advertências e Precauções


- Produto estéril. Esterilização por Raios Gama.
- Produto destinado a ambiente asséptico.
- Uso apenas por profissional qualificado e habilitado.
- Armazenar em ambiente com temperatura entre -2°C a 40°C.
- Após aberto, usar imediatamente.

IFU Instruções de Uso

Instructions for Use

- Produto de uso único, é proibido reprocessar.
- Não utilizar se a embalagem foi aberta, danificada ou molhada.
- Após o uso descartar o Alur Roller Gold® dentro do estojo em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.
- Material Classe II.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO

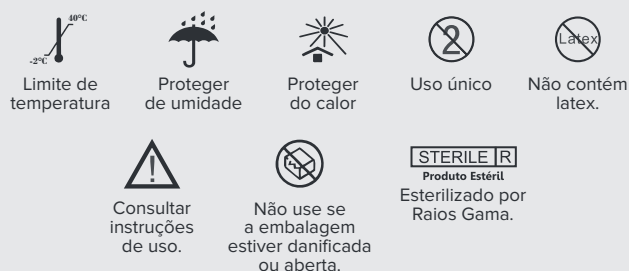

Instruções de uso

1. Escolher o modelo que melhor atende às necessidades do paciente;
2. Verificar se a embalagem do produto não está danificada e se o produto encontra-se estéril. Caso a embalagem esteja danificada a esterilidade do produto não está garantida. Neste caso, descartar o produto e utilizar outro;
3. Abrir a embalagem do produto através da técnica asséptica (sempre utilizar a pétala);



4. Deslizar o Alur Roller Gold® sobre a área a ser tratada, no formato de uma estrela, em torno de 10 vezes em cada direção (o movimento de vai e vem equivale a duas vezes), manter a intensidade e a velocidade constante para a criação correta dos microcanais;

5. No momento da utilização, com a mão não dominante, manter a pele esticada para facilitar a penetração das microagulhas;

6. Se, durante o procedimento, for necessário efetuar uma pausa, apoiar o Alur Roller Gold® na embalagem (estojo) que o acompanha;

6. Após o uso descartar o Alur Roller Gold® dentro do estojo em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.



Prazo de Validade

04 anos após a esterilização.