

EnerPen[®]

Caneta Cauterizadora


Reg. Anvisa nº: 81676070015

Descrição geral

A caneta EnerPen[®] é uma caneta termocauterizadora reutilizável, portátil, usada para cauterizar pequenos procedimentos superficiais na pele ou outros tecidos. Atua no estancamento de pequenas hemorragias, remoção de fibroma mole e outros procedimentos semelhantes.

Desenvolvida em policarbonato com capa protetora, possui botão acionador e alcança a temperatura de 600°C ou 1200°C. Utiliza pilhas AA alcalinas para o seu funcionamento.

É ideal para a utilização nas áreas de dermatologia, odontologia, otorrinolaringologia, cirurgia plástica, oftalmologia, ortopedia, urologia, ginecologia, obstetrícia, neurocirurgia, proctologia, cardiovascular, uso veterinário, entre outros.

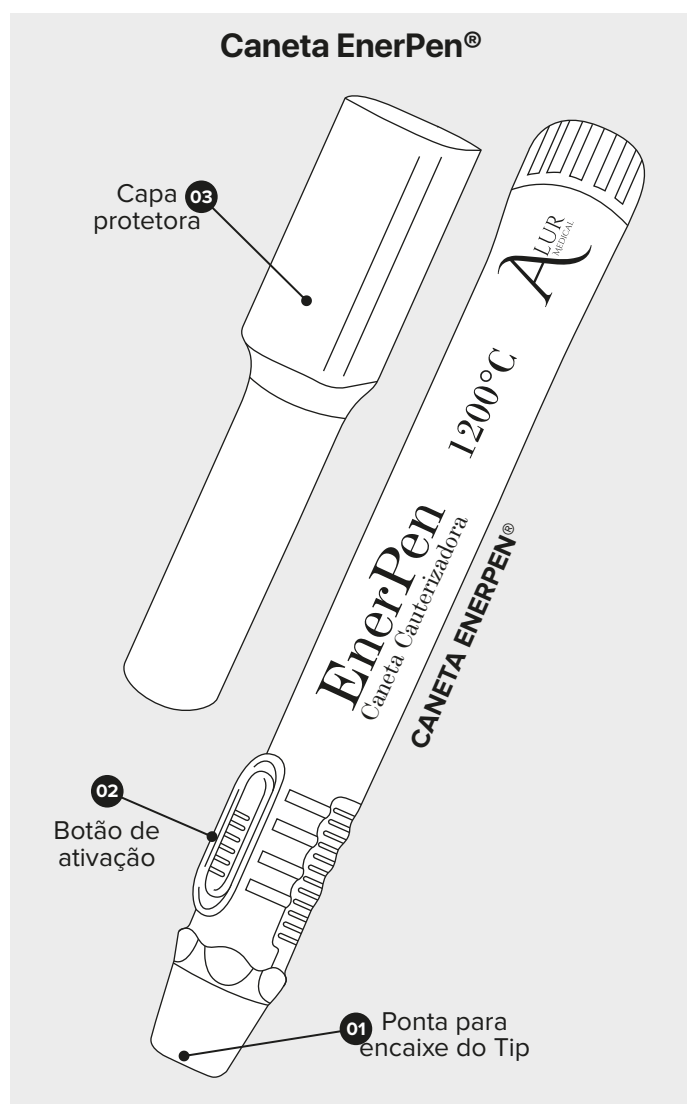

IFU

Instruções de Uso

Instructions for Use

Advertências e Precauções

- Produto esterilizado por raios gama, mas reutilizável.
 - Produto destinado a ambiente asséptico.
 - Uso apenas por profissional qualificado e habilitado.
 - Armazenar em ambiente com temperatura entre -2°C a 40°C.
 - Não utilizar se a embalagem foi aberta, danificada ou molhada.
 - Não utilizar na presença de gases, materiais inflamáveis ou em ambientes com Póde dar origem a fogo.
 - O processo de cauterização produz calor com uma temperatura de 600°C ou 1200°C. O uso indevido pode provocar queimaduras ou provocar incêndios.
 - A exposição acidental à ponta de cauterização pode provocar queimaduras acidentais no paciente ou profissional.
 - A prolongada exposição dos tecidos à cauterização pode provocar lesões nos tecidos próximos.
 - A ponta de cauterização ainda estará quente imediatamente após o uso e pode provocar queimaduras acidentais no paciente ou profissional.
 - Não deixe a caneta cauterizadora no corpo do paciente, pode causar queimaduras, caso o dispositivo seja acidentalmente ativado.
 - Material Classe II.
- ### Manutenção do Produto
- A caneta termocauterizadora EnerPen[®] é um dispositivo reutilizável. Recomenda-se a limpeza da parte externa do dispositivo sempre após o uso, quando a caneta estiver fria e sem o tip, com pano macio umedecido e com detergente neutro, e após com álcool 70%.
 - Aguardar a secagem completa antes de utilizá-la novamente.
 - Recomenda-se armazenar sem as pilhas.


EnerPen[®]

Caneta Cauterizadora

Reg. Anvisa nº: 81676070015

Instruções de uso

1. Ao usar a Caneta Termocauterizadora EnerPen[®], primeiramente remover a capa protetora e conectar o Tip apropriado para a realização do procedimento;

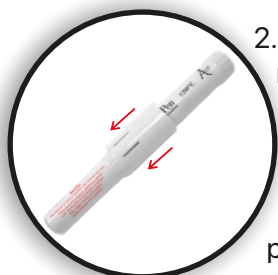

2. Verificar se a embalagem do TIP não está danificada e se o produto encontra-se estéril. Caso a embalagem esteja danificada a esterilidade do produto não está garantida. Neste caso, descartar o produto e utilizar outro;

3. Abrir a embalagem do produto através da técnica asséptica (sempre utilizar a pétala);

4. Pressionar o botão de ativação. A ponta cauterizadora irá incandescer, estando pronta para uso imediato;

5. Toque a ponta cauterizadora no ponto alvo necessário para a coagulação microvascular. Solte o botão de ativação imediatamente ao finalizar o procedimento.

6. O ciclo de funcionamento recomendado é de 2 segundos ligado e 6 segundos desligado durante um período contínuo de, no máximo, 15 minutos;

7. A ativação excessiva do dispositivo pode provocar sobreaquecimento;

8. Aplicar força excessiva sobre o dispositivo de cauterização durante o uso pode provocar torção ou quebra da ponta;

9. Após o uso, descartar o tip em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.



Contraindicações

- **NÃO** utilizar a Caneta Termocauterizadora EnerPen[®] em vasos sanguíneos maiores que 1.5mm de diâmetro, e artérias.

- Durante cirurgia oftalmológica, utilizar a Caneta Termocauterizadora EnerPen[®] nas pálpebras e tecidos ao redor dos globos oculares (**NÃO TOCAR no globo ocular**).

IFU

Instruções de Uso

Instructions for Use

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Limite de temperatura



Proteger de umidade



Proteger do calor



Uso único



Não contém latex.



Consultar instruções de uso.



Não use se a embalagem estiver danificada ou aberta.

STERILE R

Produto Estéril
Esterilizado por Raios Gama.



IPX1
Grau à prova d'água.

Segurança



INMETRO

OCP 0034

ANVISA

Prazo de Validade

Caneta EnerPen - Indeterminada.

Tips - 04 anos após a esterilização.