

Descrição geral do produto

Needle Station, modelo NS300, é um suporte para agulha e microcânula fabricado em aço inox cirúrgico. Desenvolvido para auxiliar e proporcionar agilidade nos procedimentos estéticos injetáveis. Além de prevenir ferimentos com a agulha, mantém o espaço limpo e organizado.



Advertências e Precauções


- Item pesado, mantenha fora do alcance de crianças.
- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Mantenha em local seco.
- Não pise.
- Não corte.
- Maneje com cuidado.



MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO

Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem do produto não está danificada;
2. Retirar o produto da embalagem;
3. Posicionar o suporte sob a mesa;

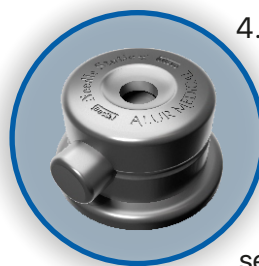

4. Para fixar a agulha ou cânula é necessário posicioná-la no orifício superior e pressionar o botão lateral;
5. O suporte permite o encaixe da agulha ou cânula de forma firme e segura, sem que seja preciso tocar na agulha e, portanto, evitando a lesão por picada, como também a contaminação da cânula;
6. Após a finalização do procedimento, higienizar o suporte com álcool 70%.

Prazo de Validade

Tempo indeterminado.