

Kit MEDTX




Reg. Anvisa nº: 81676079013

Descrição geral do produto


O Kit MedTx contempla duas agulhas com bisel trifacetados destinadas ao uso em conjunto com uma seringa de 1ml, bico Luer Lock e cilindro de Polipropileno PP e ponta zero resíduo de borracha nitrílica (NBR), para aplicação de soluções e medicamentos em diferentes vias de administração, como: endovenosa, intramuscular, intradérmica e subcutânea.

O modelo KIT-MEDTX: uma agulha MDK-25G-16MM, uma agulha MDK-34G-8MM e uma seringa ZeroLOSS, modelo ZLK-1ML, embalado em papel de grau cirúrgico, esterilizado.


Partes da seringa ZeroLOSS

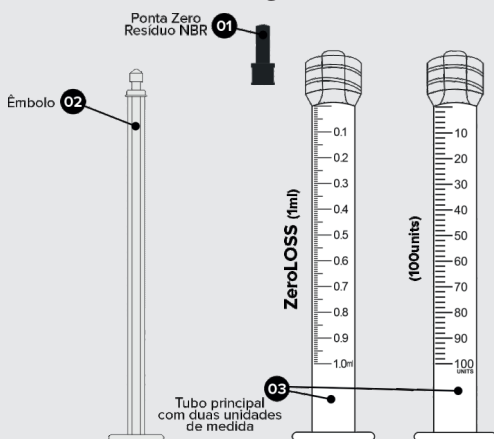

Partes das agulhas MedTx

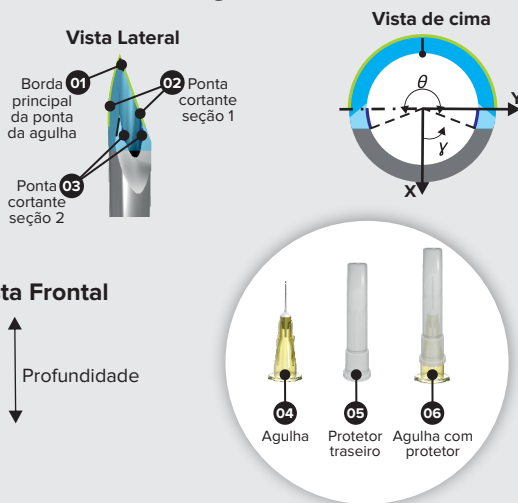

Modelos do Kit

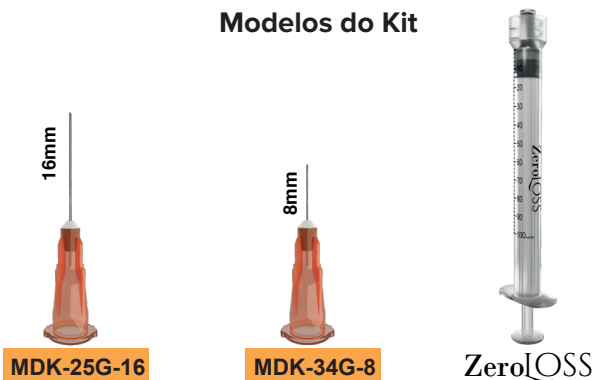

IFU Instruções de Uso

Instructions for Use

Advertências e Precauções

- Produto estéril. Esterilização por Óxido de Etileno, livre de pirogênicos e metais pesados.
- Produto destinado a ambiente asséptico.
- Uso apenas por profissional qualificado e habilitado.
- Após aberto, usar imediatamente.
- Armazenar em ambiente com temperatura entre -2°C a 40°C. Evitar exposição direta a luz, calor e umidade.
- Produto de uso único, é proibido reprocessar.
- Não utilizar se a embalagem foi aberta, danificada ou molhada.
- Após o uso descartar a agulha em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.
- Material Classe II.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem do produto não está danificada e se o produto encontra-se estéril. Caso a embalagem esteja danificada a esterilidade do produto não está garantida. Neste caso, descartar o produto e utilizar outro;



2. Abrir a embalagem do produto através da técnica asséptica (sempre utilizar a pétala);

3. Conectar a agulha MDK-25G-16mm para aspirar o material a ser injetado;

4. Remova a agulha MDK-25G-16mm e descarte-a corretamente.

5. Em seguida conecte a agulha MDK-34G-8mm para injetar o conteúdo da seringa durante o procedimento;

6. Após o uso descartar os materiais em coletor para perfurocortantes contaminados.



Prazo de Validade

05 anos após a esterilização.