

MULTIMESO[®]x5

INJETOR PARA MESOTERAPIA

Reg. Anvisa nº: 81676079016

Descrição geral

MultiMeso X5 é um dispositivo inovador, desenvolvido para a mesoterapia.


Projetado em formato de cartucho, MultiMeso X5 é um injetor múltiplo contendo 5 agulhas, disponível nos modelos: MMX5-32G-1,00mm, MMX5-32G-1,50mm, MMX5-32G-2,00mm, MMX5-32G-2,50mm, MMX5-32G-3,00mm e MMX5-32G-3,50mm.

Basta conectá-lo a uma seringa com conexão luer lock para um procedimento mais rápido e eficaz.

Desenvolvido em polietileno e agulhas com bisel trifacetado, fabricadas em liga metálica de alta resistência e parede ultrafina.

De fácil aplicação manual, é indicado para áreas delicadas e perfeito para atuar em áreas curvas da pele.

É embalado individualmente em papel de grau cirúrgico e esterilizado por gás Óxido de Etileno.

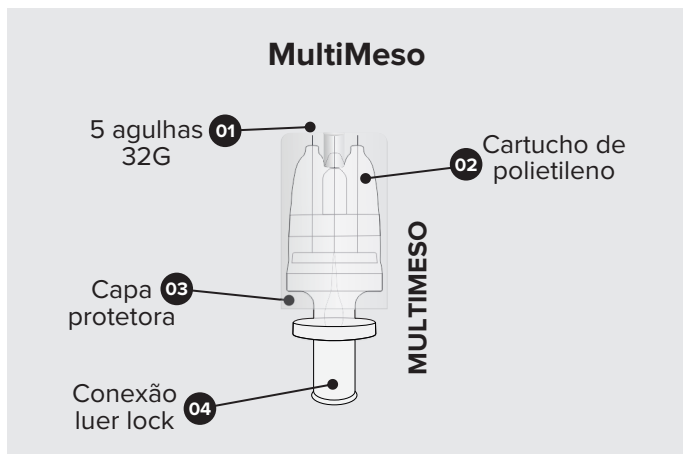

Advertências e Precauções

- Produto estéril. Esterilização por gás Óxido de Etileno
- Produto destinado a ambiente asséptico.
- Uso apenas por profissional qualificado e habilitado.
- Armazenar em ambiente com temperatura entre -2°C a 40°C.
- Após aberto, usar imediatamente.
- Produto de uso único, é proibido reprocessar.
- Não utilizar se a embalagem foi aberta, danificada ou molhada.
- Após o uso descartar o MultiMeso X5 em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.
- Material Classe II.

IFU

Instruções de Uso

Instructions for Use

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem do produto não está danificada e se o produto encontra-se estéril. Caso a embalagem esteja danificada a esterilidade do produto não está garantida. Neste caso, descartar o produto e utilizar outro;



2. Abrir a embalagem do produto através da técnica asséptica (sempre utilizar a pétala);

3. Conectar o injetor MultiMeso X5 em um aplicador (seringa) contendo a substância que será injetada e retirar a capa protetora;

4. Aplicar o injetor MultiMeso X5 de forma suave sobre a pele do paciente, de forma que as agulhas penetrem na derme e realizem a introdução da substância contida na seringa;

5. Repetir a aplicação de acordo com o local e o procedimento que será realizado pelo profissional responsável pelo tratamento;

6. Após o uso descartar o injetor MultiMeso X5 em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.



Prazo de Validade

05 anos após a esterilização.

Rev.: 11/2023