

Skin Marker

MARCADOR DERMATOGRÁFICO

Descrição geral do produto

Skin Marker é um marcador dermatográfico desenvolvido especialmente para marcações de pontos na pele. Indicado para utilização em todos os procedimentos necessários na área da saúde e estética.

O Skin Marker é de fácil remoção e possui régua de até 7cm para maior praticidade.

Disponíveis em 03 cores: azul (ASM-BLUE), vermelho (ASM-RED) e branco (ASM-WHITE).



Advertências e Precauções

- Produto não estéril.
- Armazenar em ambiente com temperatura entre -2°C a 40°C.



IFU

Instruções de Uso
Instructions for Use

Instruções de uso

1. Escolher a cor do marcador que melhor atende o tipo de pele do paciente;


2. Remover a tampa;



3. Deslizar suavemente o marcador Skin Marker sobre a área da pele do paciente a ser tratada. Demarque de acordo com o procedimento que será realizado;

4. Utilizar a demarcação como guia durante o procedimento para otimizar a qualidade dos resultados pretendidos;

5. Após o procedimento, retirar as demarcações da pele do paciente utilizando gaze e álcool 70% ou clorexidina;

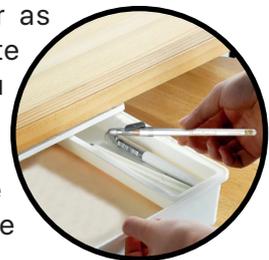

6. Após o uso, colocar a tampa e guardar o Skin Marker em local seco e arejado até o próximo uso.

Prazo de Validade

Prazo indeterminado.