

# AlurFace Training


FACE TRANSPARENTE PARA TREINAMENTO  
DE HARMONIZAÇÃO FACIAL.

## Descrição geral do produto

A AlurFace Training é uma ferramenta inovadora desenvolvida em silicone transparente com dimensões similares à face humana. Ela oferece uma visualização aprimorada que permite observar com precisão os pontos de injeção, aplicação de fios de PDO e outras técnicas de harmonização orofacial (HOF).

Esta ferramenta é projetada para auxiliar profissionais da área a aprimorar suas habilidades em HOF, proporcionando uma experiência de treinamento próxima da realidade.

### Medidas da Face

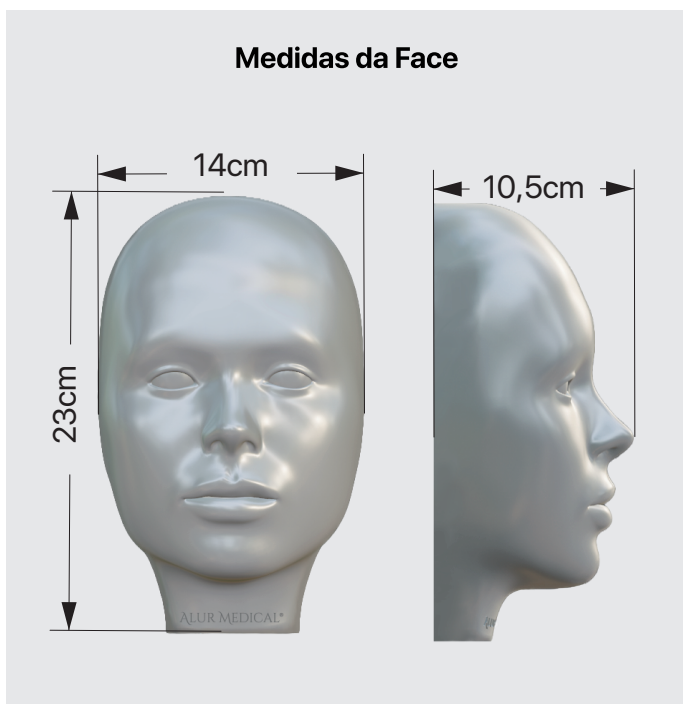

## Cuidados e Armazenamento:

- Limpe externamente a AlurFace Training com água e sabão neutro após o uso. Em caso de uso de gel, pressione devagar até que saia pelo mesmo caminho da cânula/agulha.
- Evite exposição prolongada à luz solar direta, pois isso pode danificar o material.
- Armazenar em ambiente com temperatura entre -2°C a 40°C.
- Guarde em local seco e protegido para garantir a durabilidade do produto.

# IFU Instruções de Uso

*Instructions for Use*

## MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Limite de temperatura



Proteger de umidade



Proteger do calor



Não contém latex.



Consultar instruções de uso.



Não use se a embalagem estiver danificada ou aberta.



Produto não estéril.

## Instruções de Uso

### 1. Preparação Inicial:

- Certifique-se de que a AlurFace Training esteja limpa e livre de resíduos antes de cada uso.
- Posicione-a em uma superfície plana e bem iluminada para uma visualização clara.

### 2. Visualização Aprimorada:

- A face transparente proporciona uma visualização precisa dos pontos de injeção, aplicação de fios de PDO e outras técnicas.
- Use uma lupa ou óculos de aumento, se necessário, para detalhes minuciosos.

### 3. Simulação de Procedimentos:

- Pratique técnicas de preenchimento, mapeamento facial e aplicação de agulhas ou cânulas.
- Experimente diferentes ângulos e abordagens para aprimorar suas habilidades em harmonização facial.

## Prazo de Validade

AlurFace Training - Indeterminado.