

iClick®

SERINGA DE DOSAGEM PRECISA

Reg. Anvisa nº: 81676079019


Descrição geral do produto

Seringa sem agulha, com capacidade de 1ml, bico Luer Lock, esterilizada por Óxido de Etileno, de uso único.

A seringa iClick é composta por cilindro de polipropileno; êmbolo zero resíduo de borracha nitrílica (NBR).

A qualidade de zero resíduo faz com que a seringa iClick, modelo CLI-1ML, seja ideal para a medicina estética (mesoterapia ou intradermoterapia e aplicação de Toxina Botulínica), além dos procedimentos realizados na odontologia e outros procedimentos em conformidade com as normas ISO.

Embalada individualmente em papel de grau cirúrgico, esterilizada.

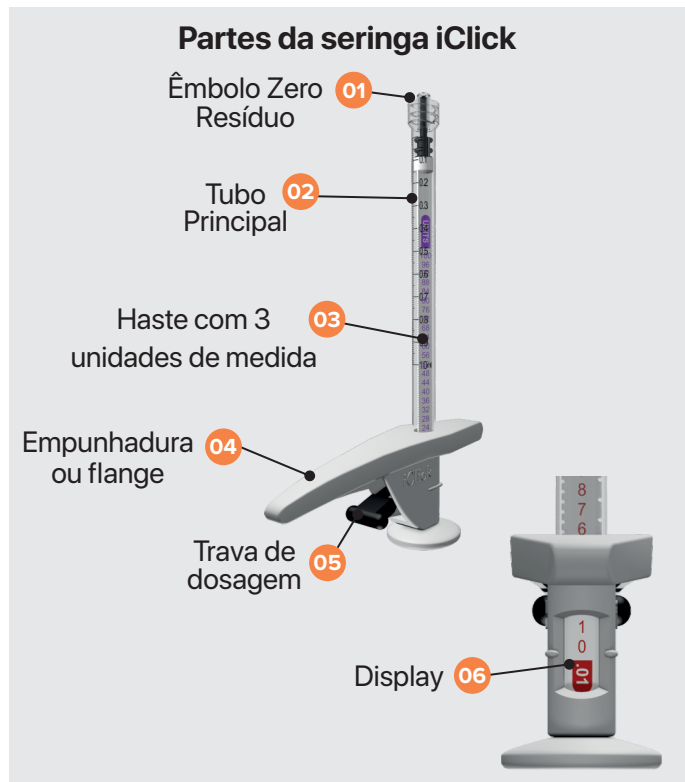

Advertências e Precauções

- Produto estéril. Esterilização por Óxido de Etileno, livre de pirogênicos e metais pesados.
- Produto destinado a ambiente asséptico.
- Uso apenas por profissional qualificado e habilitado.
- Após aberto, usar imediatamente.
- Armazenar em ambiente com temperatura entre -2°C a 40°C.
- Produto de uso único, é proibido reprocessar.

IFU Instruções de Uso

Instructions for Use

- Não utilizar se a embalagem foi aberta, danificada ou molhada.
- Após o uso descartar o produto de acordo com os critérios vigentes de biossegurança.
- Material Classe II.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem do produto não está danificada e se o produto encontra-se estéril. Caso a embalagem esteja danificada a esterilidade do produto não está garantida. Neste caso, descartar o produto e utilizar outro;

2. Abrir a embalagem do produto através da técnica asséptica (sempre utilizar a pétala);



3. Para destravar a seringa, coloque a trava de dosagem para baixo.

4. Em seguida, conecte a agulha a ser utilizada ao bico da seringa, realizando uma leve torção rotacional, travando a agulha;

5. Aspire o produto, escolha a unidade de medida (0,01ml, 0,02ml ou 0,04ml). Posicione no display, a haste de acordo com a medida escolhida e acione a trava de dosagem, colocando-a para cima.



6. Utilizar a seringa conforme técnica adequada para administração de medicamentos;

7. Após o uso descartar a agulha e a seringa em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.

Prazo de Validade

05 anos após a esterilização.