

MesoDERM®



Reg. Anvisa nº: 81676079014


Descrição geral do produto

Agulha com bisel trifacetado destinada ao uso em conjunto com seringa para aplicação de soluções e medicamentos em diferentes vias de administração, como: endovenosa, intramuscular, intradérmica e subcutânea.

Disponível em diferentes modelos: MDK-25G-16MM, MDK-30G-13MM, MDK-32G-6MM e MDK-34G-8 Slim.

A agulha MesoDerm® possui protetor traseiro com coloração específica, conforme dimensões do produto.

Embalada individualmente em papel de grau cirúrgico, esterilizada.

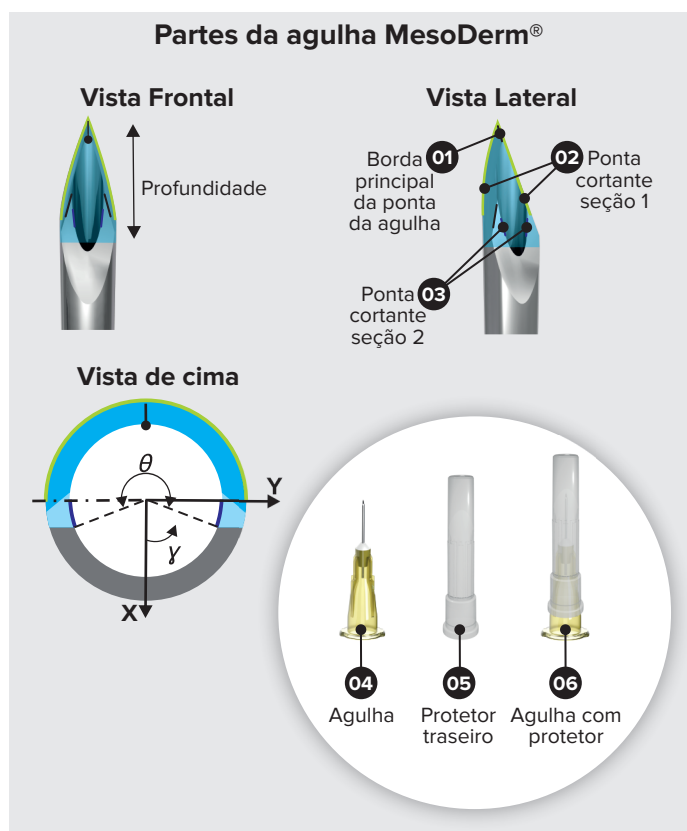

Modelos Disponíveis




IFU Instruções de Uso

Instructions for Use

Advertências e Precauções

- Produto estéril. Esterilização por Óxido de Etileno, livre de pirogênios e metais pesados.
- Produto destinado a ambiente asséptico.
- Uso apenas por profissional qualificado e habilitado.
- Após aberto, usar imediatamente.
- Armazenar em temperatura ambiente. Evitar exposição direta a luz, calor e umidade.
- Produto de uso único, é proibido reprocessar.
- Não utilizar se a embalagem foi aberta, danificada ou molhada.
- Após o uso descartar a agulha em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.
- Material Classe II.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO

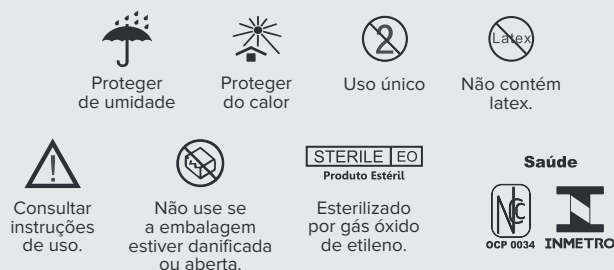

Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem do produto não está danificada e se o produto encontra-se estéril. Caso a embalagem esteja danificada a esterilidade do produto não está garantida. Neste caso, descartar o produto e utilizar outro;
2. Abrir a embalagem do produto através da técnica asséptica (sempre utilizar a pétala);
3. Conectar a agulha MesoDerm® em um aplicador (seringa) contendo o material a ser injetado;
4. Inserir a agulha MesoDerm® na derme do paciente e aplicar o conteúdo da seringa;
5. Após o uso descartar a agulha em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.



Prazo de Validade

05 anos após a esterilização.



Descrição geral do produto


Agulha com bisel trifacetado destinada ao uso em conjunto com seringa para aplicação de soluções e medicamentos em diferentes vias de administração, como: endovenosa, intramuscular, intradérmica e subcutânea.

Disponível nos modelos MDK-27G 4mm, MDK-29G 4mm, MDK-30G 4mm, MDK-31G 4mm, MDK-32G 4mm, MDK-33G 4mm, MDK-34G 4mm.

A agulha MesoDerm[®] possui protetor traseiro com coloração específica, conforme dimensões do produto.

Embalada individualmente em papel de grau cirúrgico, esterilizada.

Partes da agulha

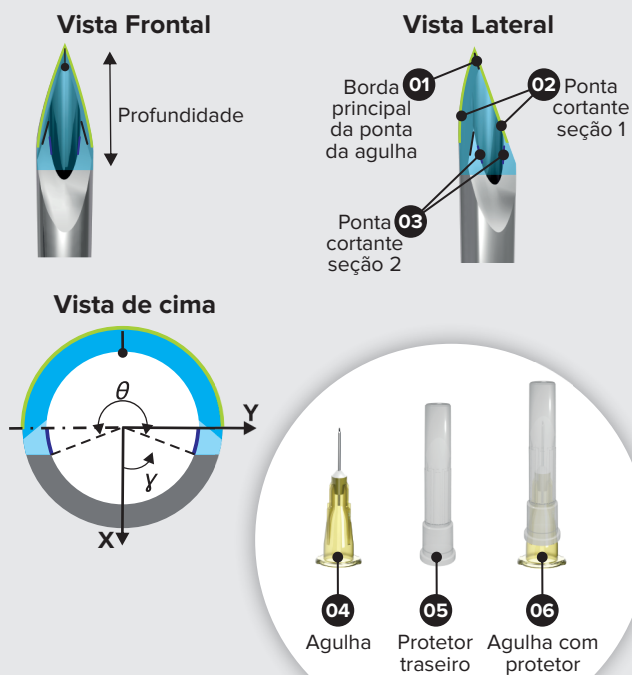

Advertências e Precauções

- Produto estéril. Esterilização por Óxido de Etileno, livre de pirogênicos e metais pesados.
- Produto destinado a ambiente asséptico.
- Uso apenas por profissional qualificado e habilitado.
- Após aberto, usar imediatamente.

IFU Instruções de Uso

Instructions for Use

- Armazenar em temperatura ambiente. Evitar exposição direta a luz, calor e umidade.
- Produto de uso único, é proibido reprocessar.
- Não utilizar se a embalagem foi aberta, danificada ou molhada.
- Após o uso descartar a agulha em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.
- Material Classe II.

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



STERILE EO
Produto Estéril

Instruções de uso

1. Verificar se a embalagem do produto não está danificada e se o produto encontra-se estéril. Caso a embalagem esteja danificada a esterilidade do produto não está garantida. Neste caso, descartar o produto e utilizar outro;

2. Abrir a embalagem do produto através da técnica asséptica (sempre utilizar a pétala);



3. Conectar a agulha MesoDerm[®] em um aplicador (seringa) contendo o material a ser injetado;

4. Inserir a agulha MesoDerm[®] na derme do paciente e aplicar o conteúdo da seringa;



5. Após o uso descartar a agulha em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.

Prazo de Validade

05 anos após a esterilização.