


## Descrição geral

O cartucho Alur Derma Needles é composto por um cilindro plástico cravejado com uma ou mais microagulhas cirúrgicas ultrafinas com a finalidade de perfurar a pele verticalmente, possibilitando uma rápida e intensa estimulação da produção natural de colágeno e elastina.


As microagulhas são de aço inoxidável 304, material altamente resistente, garantindo um procedimento sem perder o fio da microagulha do início ao fim da sessão.

Os cartuchos Alur Derma Needles são descartáveis, esterilizados e estão disponíveis em 3 modelos: ADN-12 (12 agulhas), ADN-36 (36 agulhas), ADN-N7D (Nano 137), que são indicados de acordo com o procedimento realizado.

## Partes do cartucho Alur Derma Needles

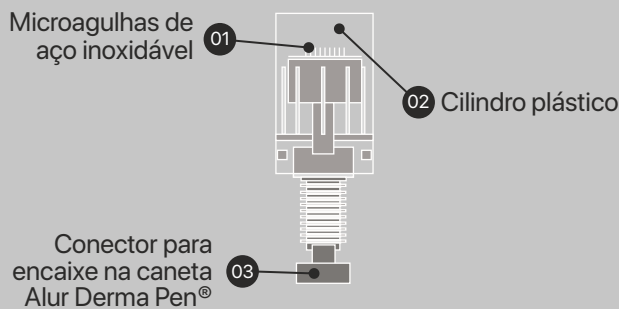

## Alur Derma Needles - Indicações

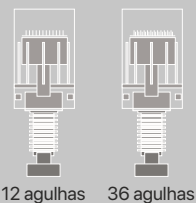

12 e 36 microagulhas  
Indicados para  
Microagulhamento.



Nano 7D  
Indicado para áreas sensíveis, como:  
região de pálpebra superior, inferior,  
lábios e região íntima.

## Advertências e Precauções

- Produto estéril. Esterilização por raios gama.
- Produto destinado a ambiente asséptico.
- Uso apenas por profissional qualificado e habilitado.
- Armazenar em ambiente com temperatura entre -2°C a 40°C.
- Não utilizar se a embalagem foi aberta, danificada ou molhada.
- Material Classe II.

### MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



## Instruções de uso

1. Escolher o modelo de cartucho que melhor atende às necessidades do paciente;
2. Verificar se a embalagem do produto não está danificada e se o produto encontra-se estéril. Caso a embalagem esteja danificada a esterilidade do produto não está garantida. Neste caso, descartar o produto e utilizar outro;
3. Abrir a embalagem do cartucho através da técnica asséptica (sempre utilizar a pétala). Conectar o cartucho à caneta;



4. Deslizar suavemente a caneta Alur Derma Pen® sobre a área a ser tratada, mantendo a intensidade e velocidade constantes para a criação correta de microcanais. A caneta NÃO deve ser pressionada. Efetue de 2 a 4 passadas no local definido, em sentidos diversos (vertical, horizontal e diagonal);

5. Após o uso descartar o cartucho Alur Derma Needles em coletor para materiais perfurocortantes contaminados.



## Prazo de Validade

Cartuchos Alur Derma Needles - 04 anos.