

Skin Pencil

LÁPIS DERMATOGRÁFICO

Descrição geral do produto




Lápis dermatográfico desenvolvido especialmente para marcação de pontos na pele. Indicado para toxina, preenchimento ou procedimentos afins.

Possui apontador acoplado à tampa e régua até 12cm para maior praticidade.

Fabricado em madeira de alta qualidade e textura suave.

Disponível: Branco (ASP-WHI).

Lápis Dermatográfico Skin Pencil

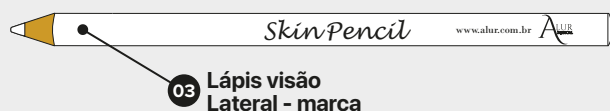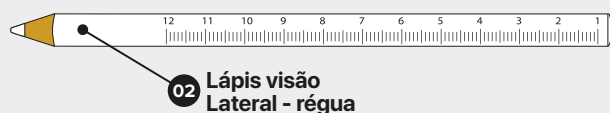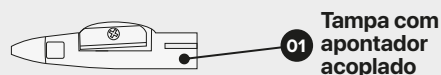

Advertências e Precauções

- Produto não estéril.
- Armazenar em ambiente com temperatura entre -2°C a 40°C.
- Não utilizar o lápis se o lacre foi aberto, danificado ou molhado.
- Material Classe I.

IFU

Instruções de Uso

Instructions for Use

MANTENHA EM LOCAL SECO E AREJADO



Instruções de uso

1. Escolher a cor do lápis que melhor atende o tipo de pele do paciente;

2. Verificar se o lacre de segurança do lápis não está danificado/aberto, neste caso, descartar o produto e utilizar outro;



3. Abrir o lacre de segurança do lápis e remover a tampa/apontador;

4. Deslizar suavemente o lápis Skin Pencil sobre a área da pele do paciente a ser

tratada. Demarcar de acordo com o procedimento que será realizado;

5. Utilizar a demarcação como guia durante o procedimento para otimizar a qualidade dos resultados pretendidos;



6. Após o procedimento, retirar as demarcações da pele do paciente utilizando gaze e álcool 70° ou clorexidina;

7. Após o uso, colocar a tampa e guardar o lápis Skin Pencil em local seco e arejado até o próximo uso.

Prazo de Validade

4 anos a partir da data de fabricação.